

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Самарский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Программное обеспечение для проведения дыхательных тренингов по релаксации и  
стабилизации эмоционального состояния при помощи виртуальной реальности с  
использованием метода биологической обратной связи  
(«ReviSide»)

Инструкция по установке

Самара, 2024 г.

## 1. Назначение

Программное обеспечение «ReviSide» предназначено для проведения дыхательных тренировок по релаксации и стабилизации эмоционального состояния при помощи виртуальной реальности с использованием метода биологической обратной связи.

Тренинг проходит с применением безопасных технических средств: ноутбука, гарнитуры виртуальной реальности и датчика, регистрирующего частоту дыхания.

## 2. Технические требования

№	Параметр	Характеристика
1	Процессор	Intel Core i7 и выше поколения
2	Оперативная память, Гб	не менее 16 Гб
3	Графический процессор	NVIDIA 2060 или выше (только NVIDIA с обязательной поддержкой VR (VR ready))
4	Видеовыход	DisplayPort 1.2 или новее
5	Объем SSD	не менее 512 Гб
6	Операционная система	Windows 10 или старше

## 3. Установка экземпляра программы

1) Скачайте архив **reviside\_1.25.20.zip** с экземпляром программы по ссылке <https://youtrack.smuut.ru/articles/OP-A-2>

2) Распакуйте архив. Переместите папку с распакованным архивом в корневой каталог или в папку Program files.

Например: C:\Program files\ReviSide\Reviside\_1.25.20

**Важно!** Путь к файлу ReviSide.exe не должен содержать кириллических и специальных символов, иначе выгрузка протокола может работать с ошибками.

3) В папке Reviside\_1.25.20 запустите файл ReviSide.exe — загрузится стартовый экран (рис. 1).

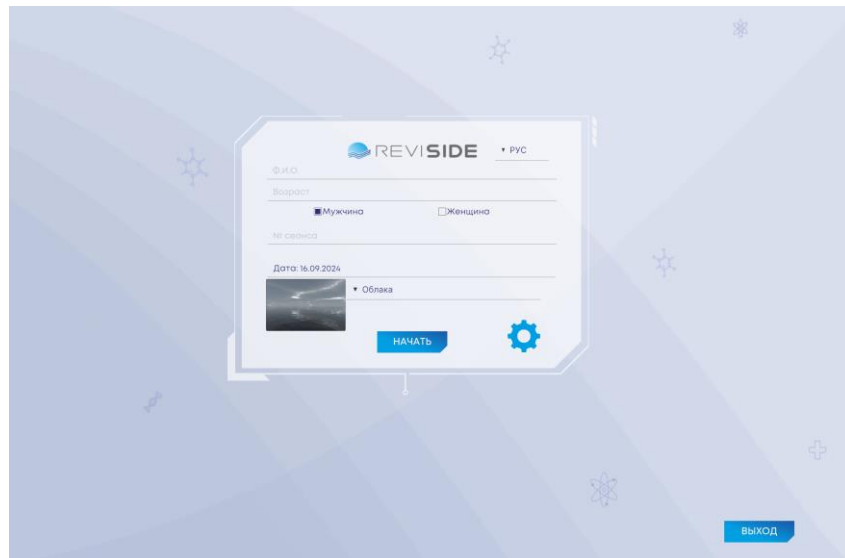


Рисунок 1 — Стартовый экран