

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

**Программное обеспечение для мультисенсорного тренажера реабилитации
пациентов с нарушениями двигательных функций нижних конечностей
«ReviVR»**

Инструкция по установке

Самара, 2024 г.

В данной инструкции описаны действия по установке программного обеспечения для мультисенсорного тренажера реабилитации пациентов с нарушениями двигательных функций нижних конечностей «ReviVR» (далее — «Ревайвер»).

Предусловие:

Для корректной работы «Ревайвер» необходимо наличие программы Microsoft Visual C++. В случае отсутствия программы, на персональный компьютер (далее — ПК) необходимо произвести установку Microsoft Visual C++. Для этого необходимо ввести в адресной строке браузера URL-адрес: https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe и произвести установку программного обеспечения (далее — ПО), следуя указаниям программы установки Microsoft Visual C++ (см. Рисунок 1).

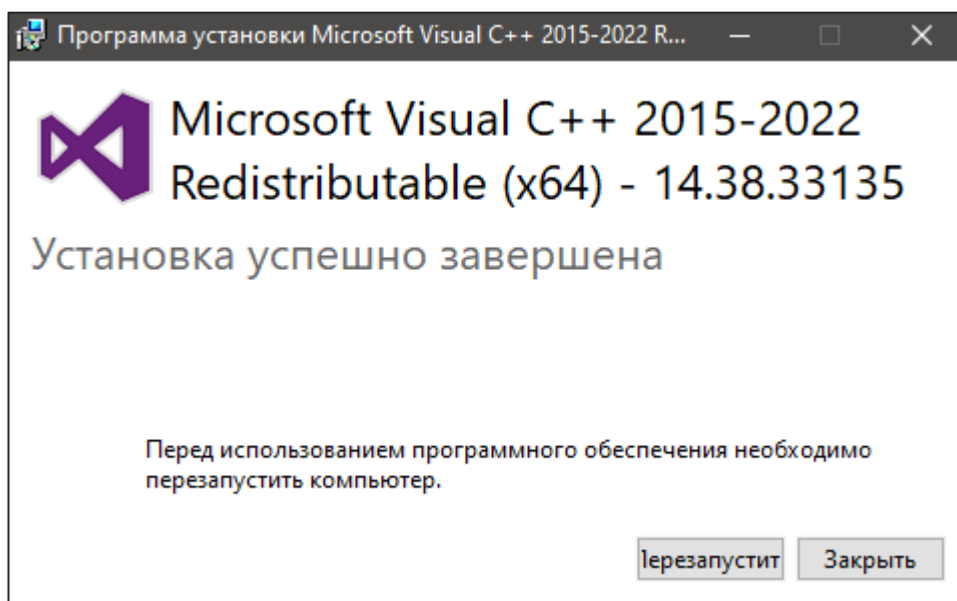


Рисунок 1 – Программа установки Microsoft Visual C++

Для того чтобы установить «Ревайвер» на ПК, необходимо выполнить следующие действия:

1. Скачать архив CPI. Для этого необходимо ввести в адресной строке браузера URL-адрес: <https://youtrack.smuit.ru/articles/OP-A-3/ReviVR>.
2. Сохранить папку CPI на корневой диск C:\ на ПК и распаковать скачанный архив CPI.rar.
3. Открыть сохраненную папку CPI.
4. Открыть папку CP210x_Universal_Windows_Driver.
5. Открыть приложение CP210xVCPInstaller_x64.exe (см. Рисунок 2), и произвести установку драйвера согласно указаниям мастера установки драйверов устройств.

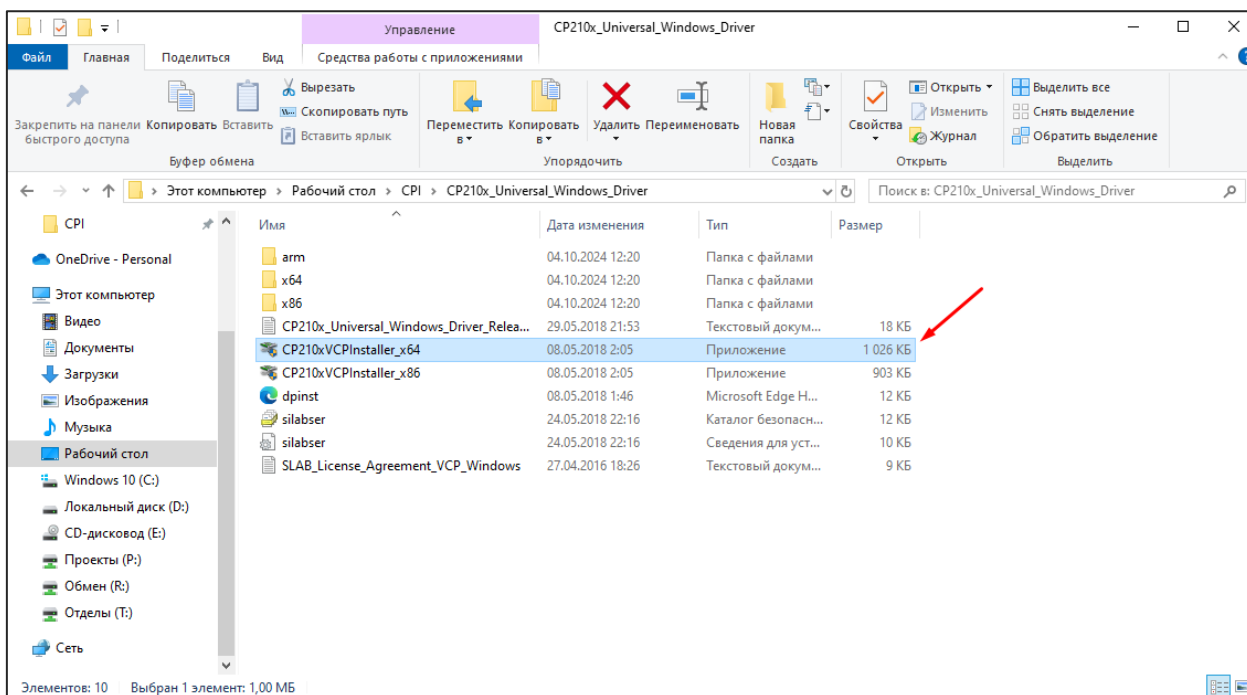


Рисунок 2 – Установка драйвера

6. Открыть папку Log_Service_September2020 (см. Рисунок 3).

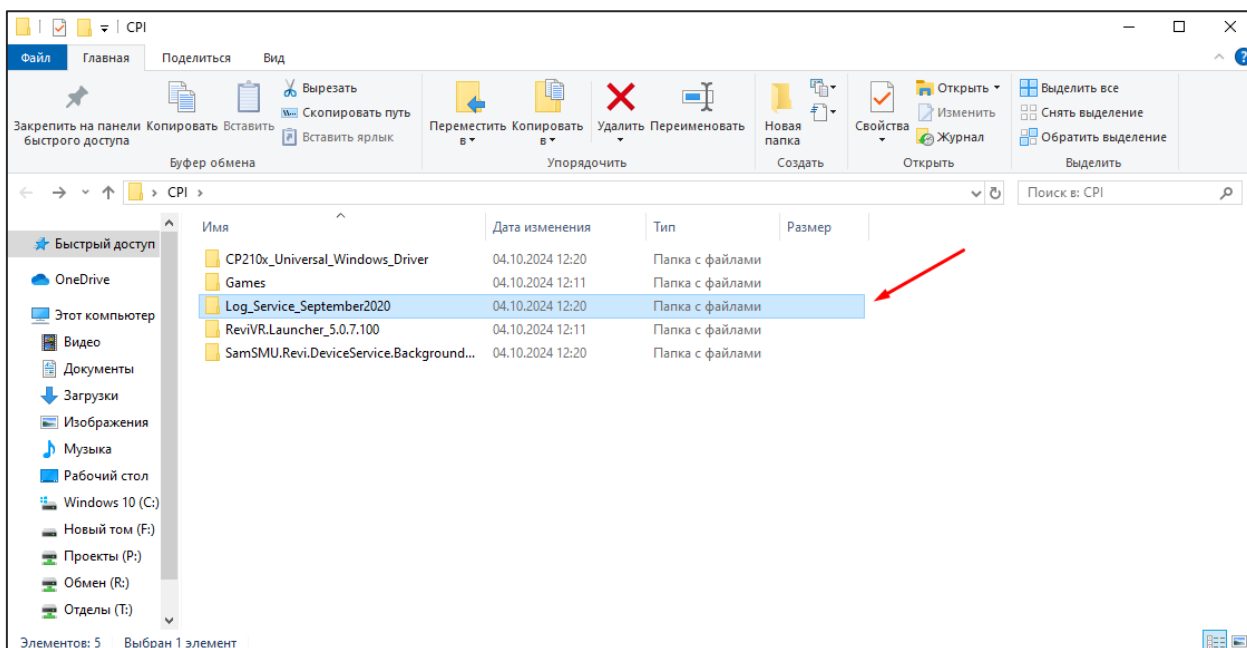


Рисунок 3 – Папка Log_Service_September2020

7. Запустить файл Service.Install.bat (см. Рисунок 4). При появлении черного окна нажать клавишу Enter и закрыть его.

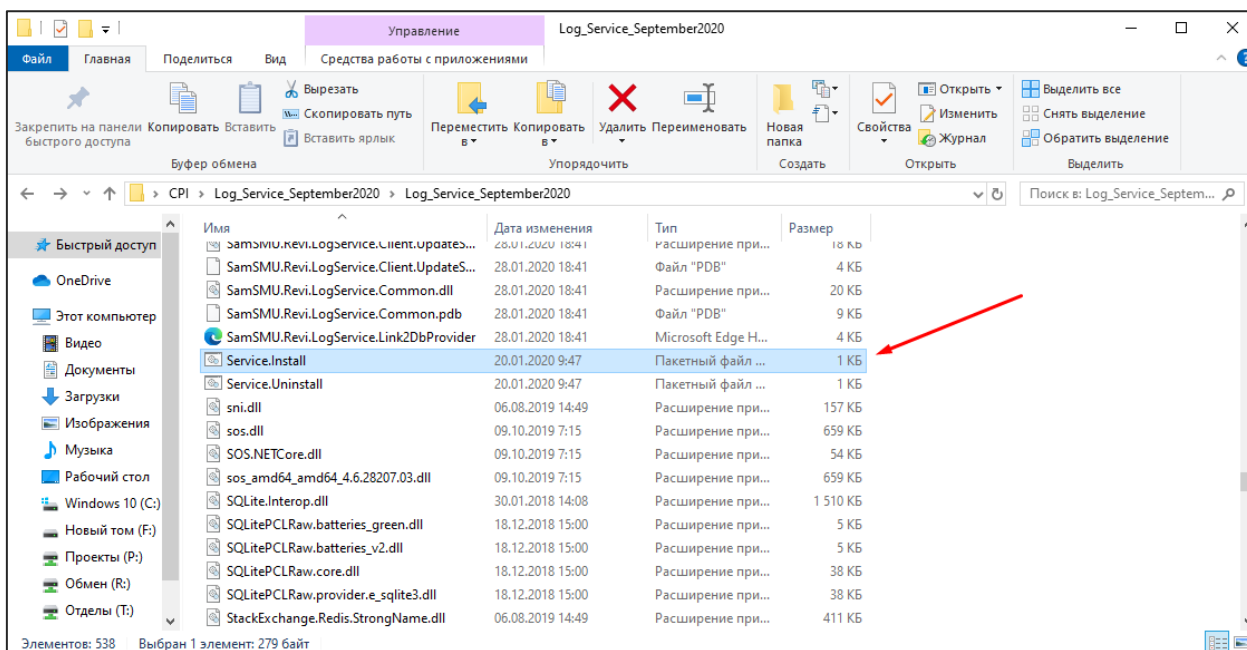


Рисунок 4 – Файл Service.Install.bat

8. Установить приложение SamSMU.Revi.LogService.Client.App.exe (см. Рисунок 5).

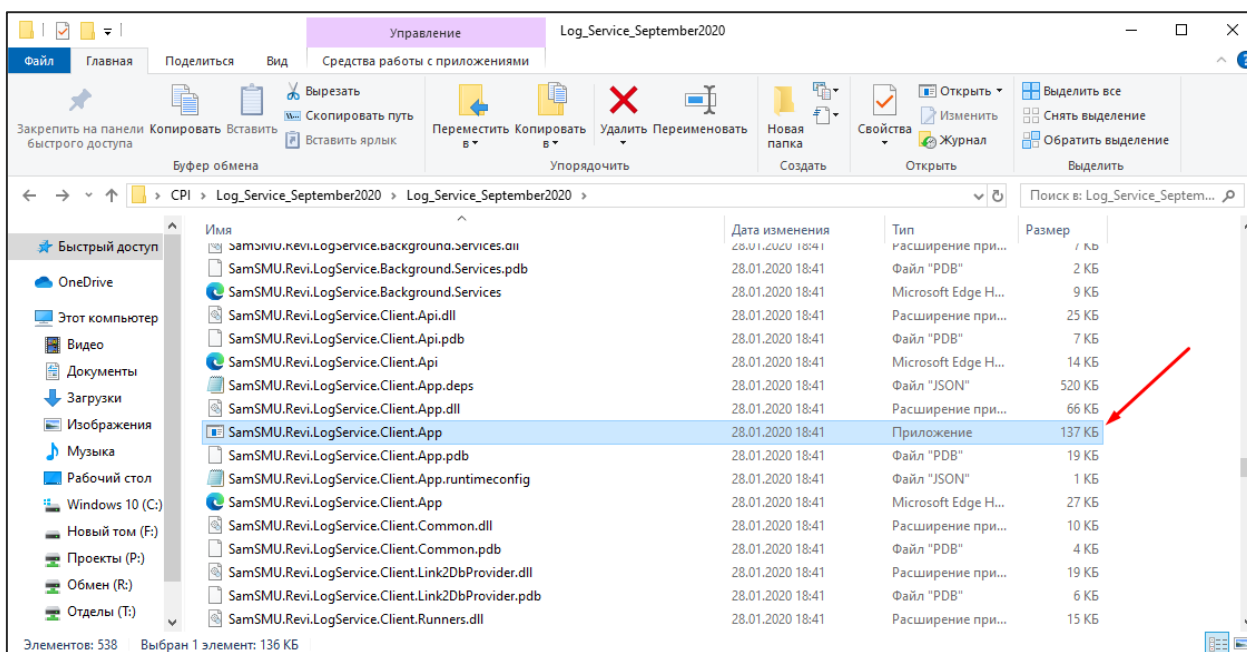


Рисунок 5 – Приложение SamSMU.Revi.LogService.Client.App.exe

9. Вернуться в папку CPI и открыть папку SamSMU.Revi.DeviceService.Background.App.1.0.0.11 (см. Рисунок 6).

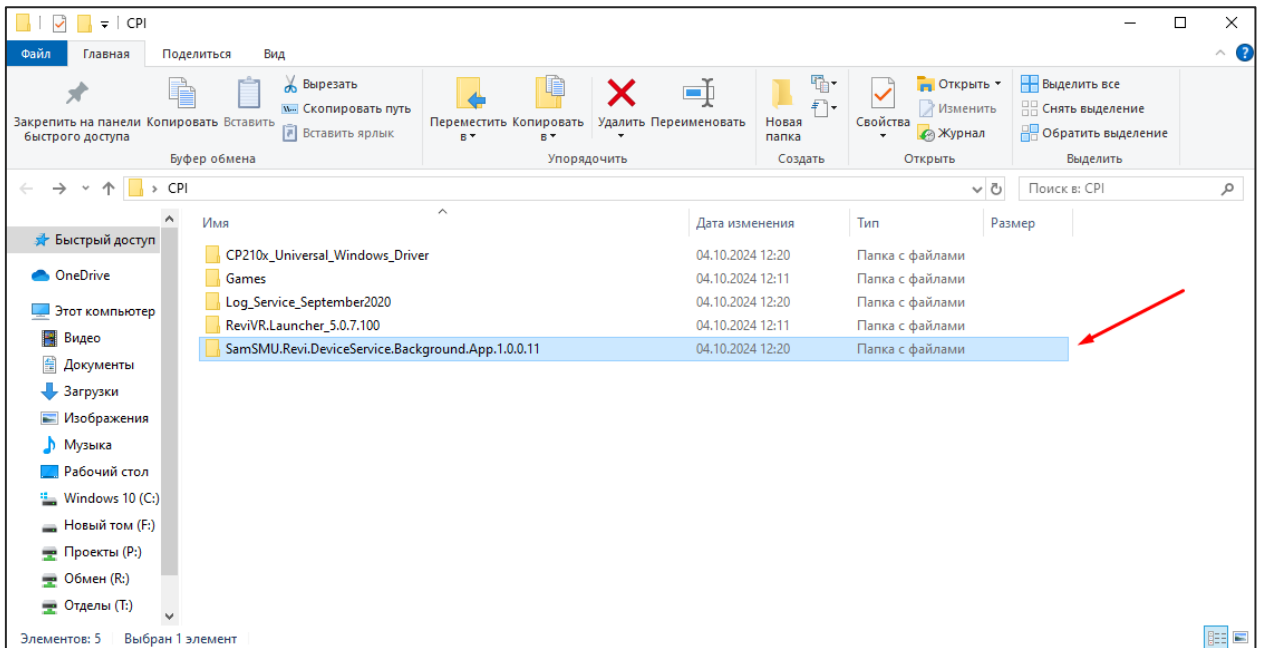


Рисунок 6 – Папка SamSMU.Revi.DeviceService.Background.App.1.0.0.11

10. Открыть файл Service.Install.bat (см. Рисунок 7). При появлении черного окна нажать клавишу Enter и закрыть его.

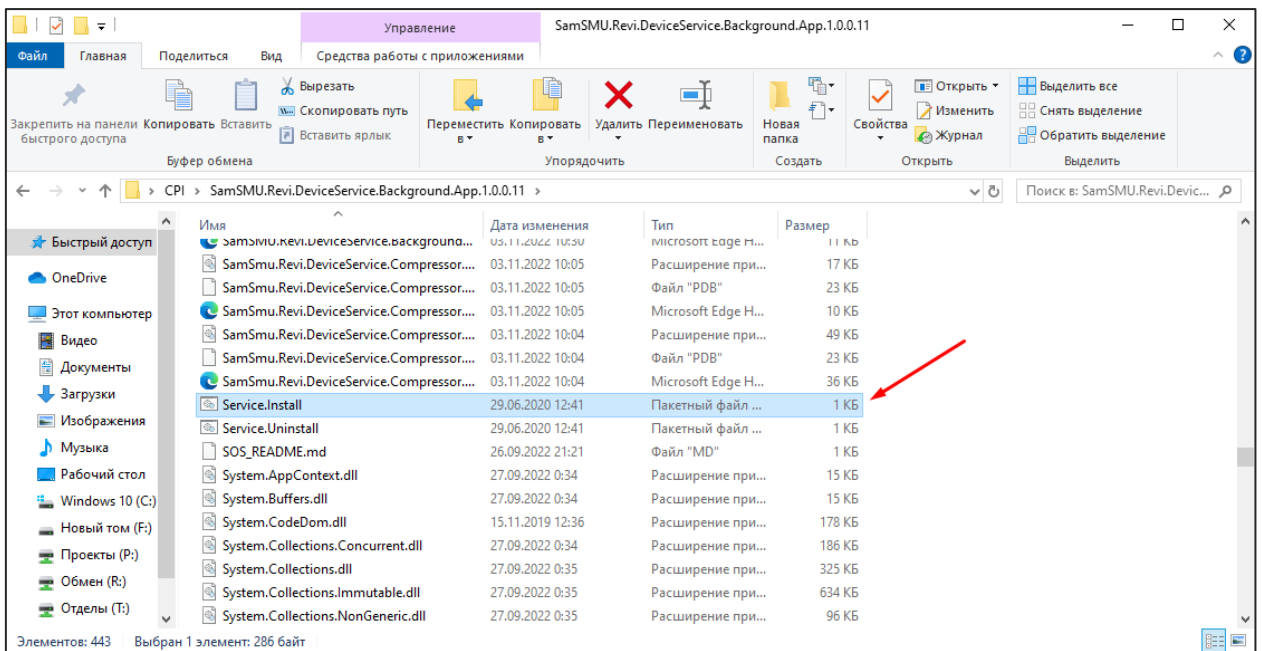


Рисунок 7 – Файл Service.Install.bat

11. Установить приложение SamSMU.Revi.DeviceService.Background.App.exe (см. Рисунок 8).

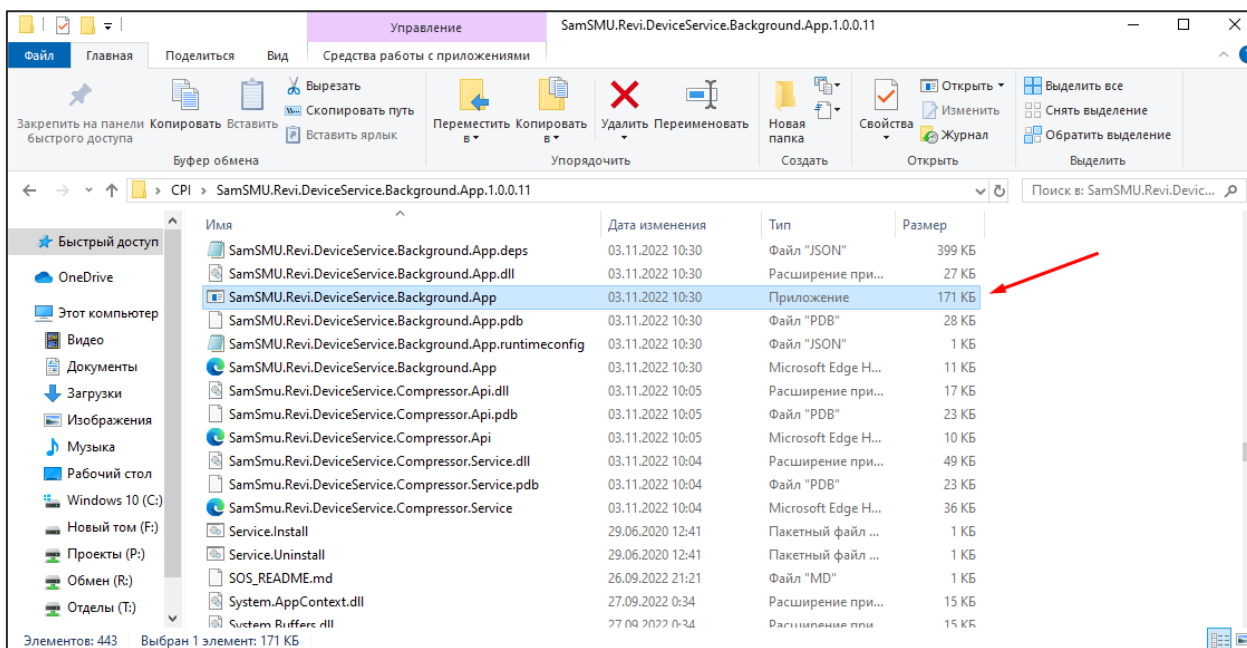


Рисунок 8 – Приложение SamSMU.Revi.DeviceService.Background.App.exe

12. Вернуться в папку CPI и открыть папку ReviVR.Launcher_5.0.7.100 (см. Рисунок 9).

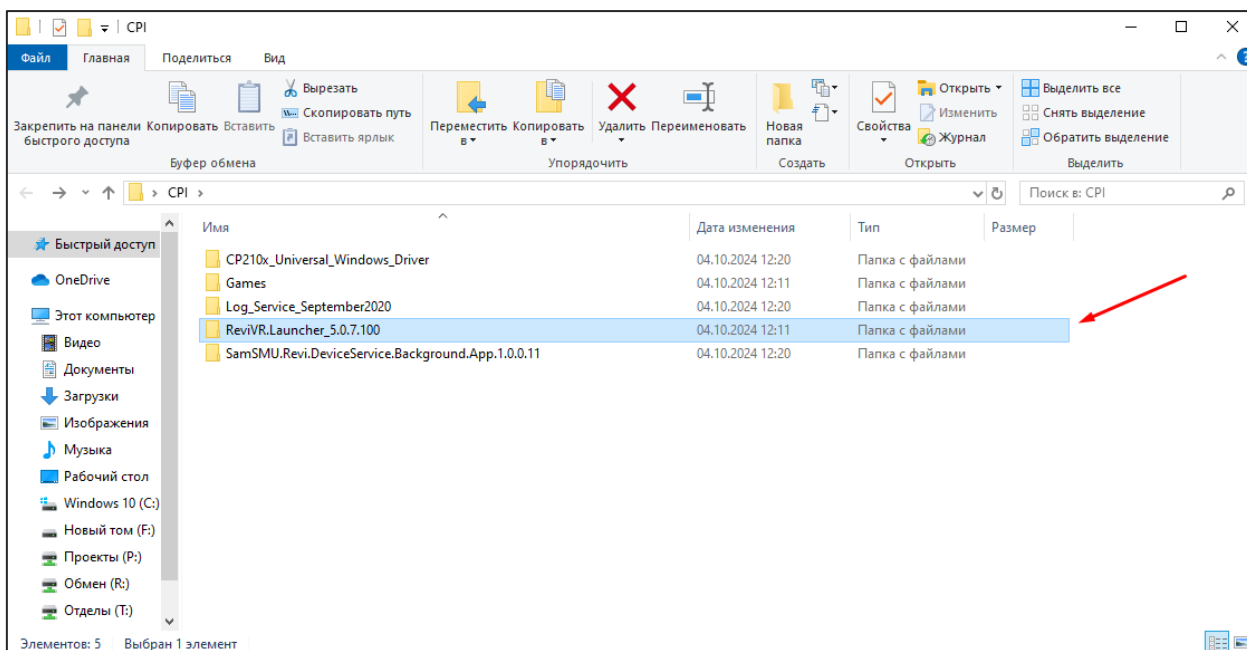


Рисунок 9 – Папка «ReviVR.Launcher_5.0.7.100»

13. Запустить файл начальной загрузки setup.exe (см. Рисунок 10) и произвести установку ПО, следуя указаниям программы установки ReviVR.

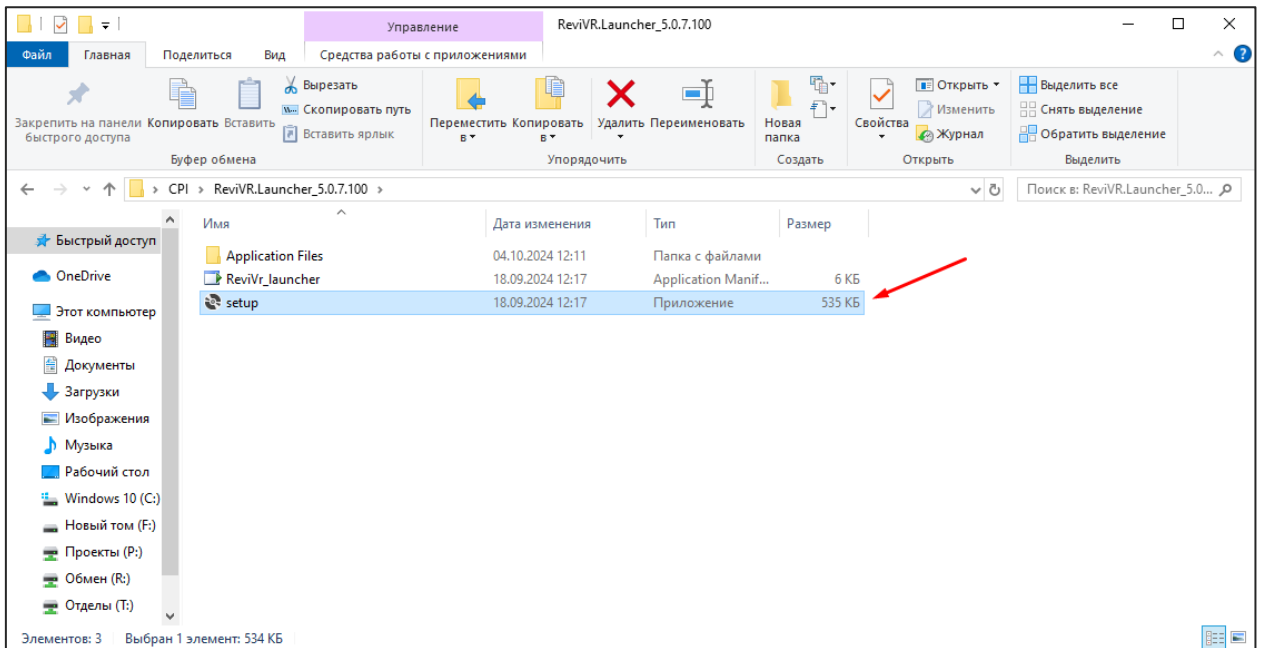


Рисунок 10 – Файл начальной загрузки setup.exe

В результате ПО Ревайвер будет установлено на ПК. На рабочем столе появится ярлык Ревайвера (см. Рисунок 11).



Рисунок 11 – Ярлык «Ревайвер»

14. Для того чтобы открыть «Ревайвер» на ПК, необходимо дважды нажать правой кнопкой мыши на ярлык «ReviVR.Launcher» (см. Рисунок 11).

В результате отобразится стартовая страница ПО «Ревайвер» (см. Рисунок 12).

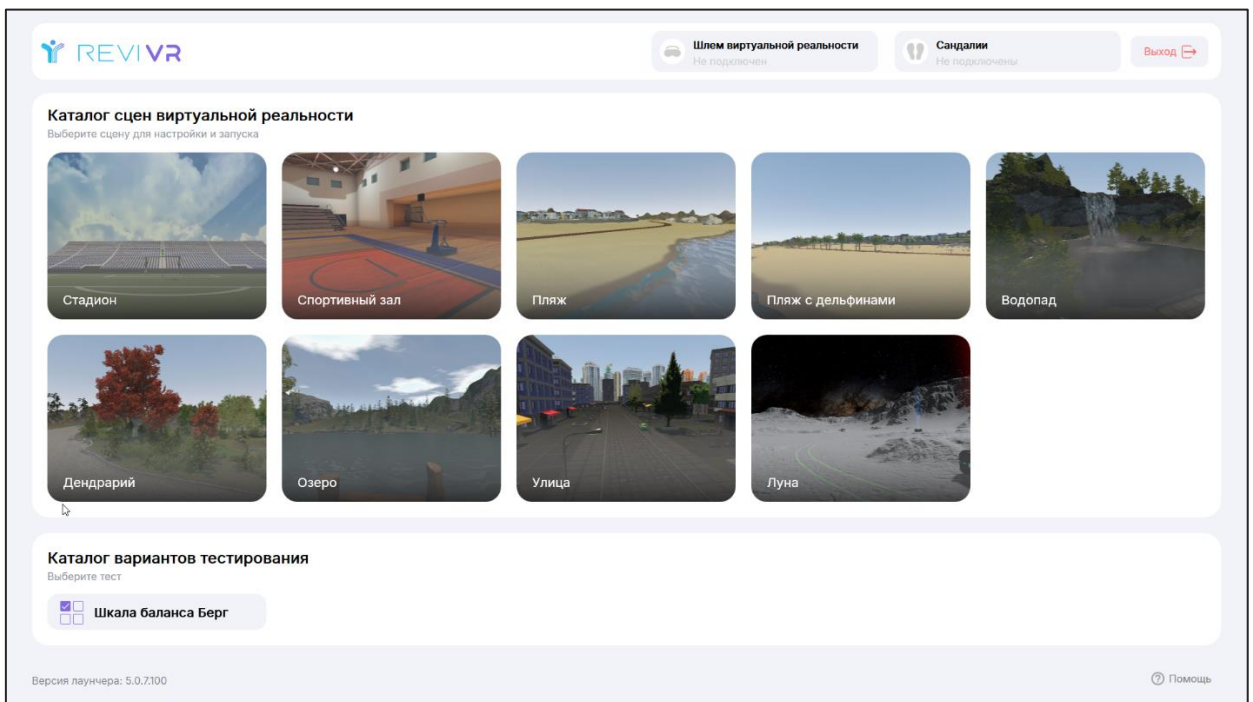


Рисунок 12 – Стартовая страница ПО Ревайвер

15. На стартовой странице выберите сцену виртуальной реальности из каталога сцен виртуальной реальности, задайте настройки сцены (см. «Инструкция по эксплуатации») и нажмите кнопку «Запустить».

16. В окне ввода лицензии укажите следующие данные:

– login: testovi@mail.ru;

– пароль: 12345678.