

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Самарский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации

**Программное обеспечение для мультисенсорного тренажера активной  
реабилитации «ReviMotion»  
Инструкция по установке**

Самара, 2024 г.

В данной инструкции описаны действия по установке программного обеспечения для мультисенсорного тренажера активной реабилитации «ReviMotion» (далее — «Ревимоушен»).

Для того чтобы установить «Ревимоушен» на персональный компьютер (далее — ПК) необходимо выполнить следующие действия:

1. Ввести в адресной строке браузера URL-адрес <https://is.rehab.smuit.ru/download> и нажать клавишу «Enter».
2. В открывшейся странице браузера нажать кнопку «Install» (см. Рисунок 1).

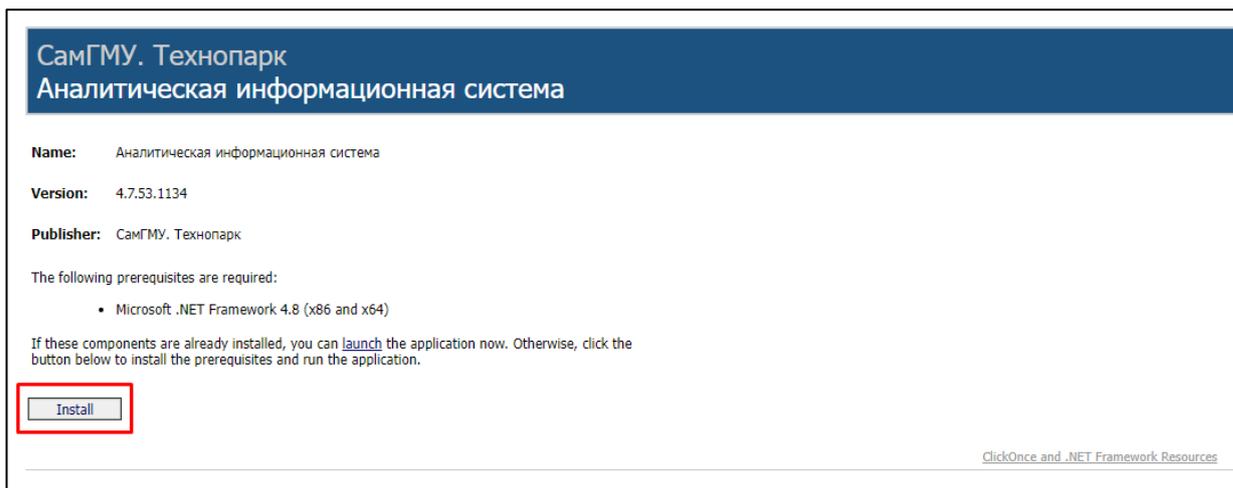


Рисунок 1 – Кнопка «Install»

3. Найти в пункте меню «Загрузки» браузера загруженный файл и нажать на него (см. Рисунок 2).

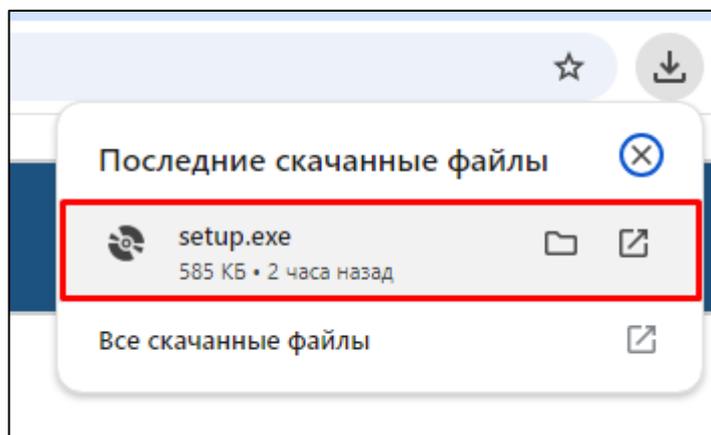


Рисунок 2 – Загруженный файл

4. Нажать кнопку «Установить» в открывшемся модальном окне «Установка приложения» (см. Рисунок 3).

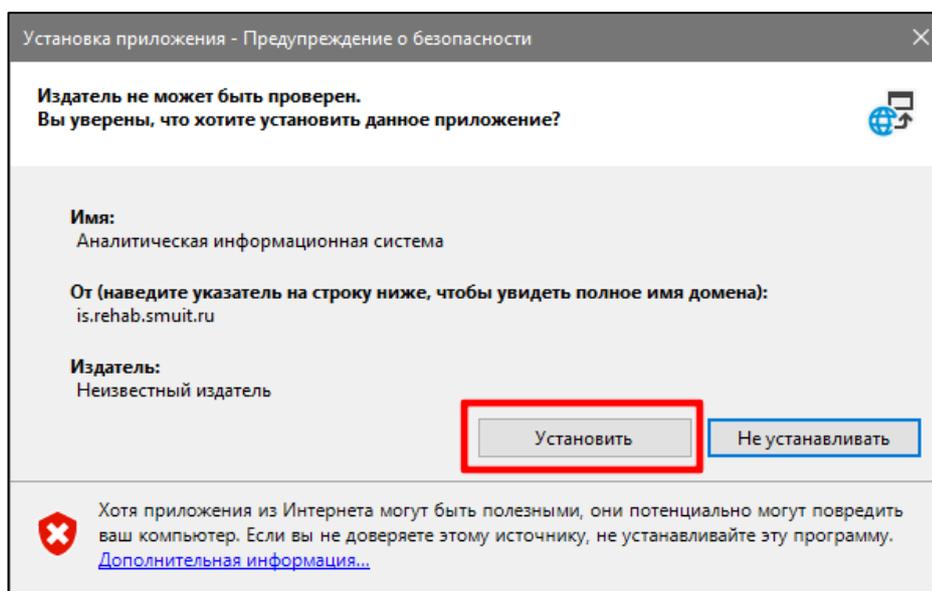


Рисунок 3 – Модальное окно «Установка приложения» и кнопка «Установить»

5. Дождаться завершения установки (см. Рисунок 4), программное обеспечение (далее — ПО) запустится автоматически.

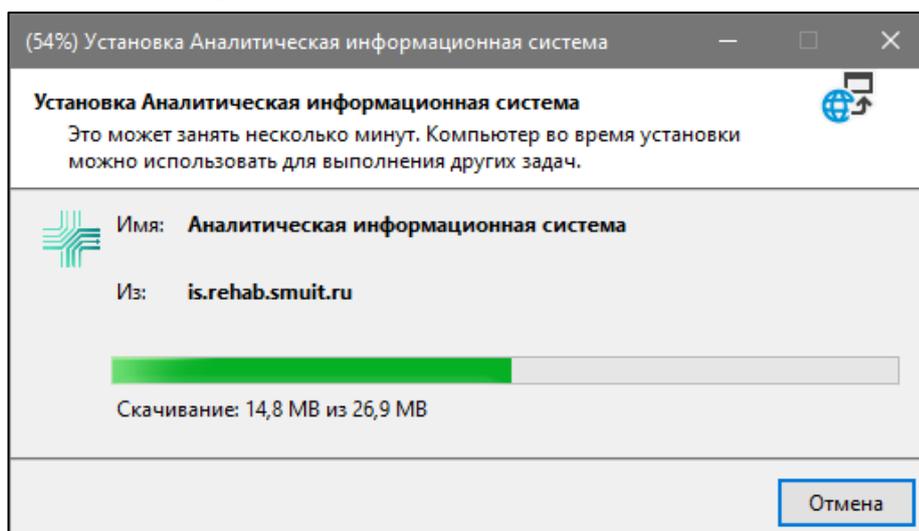


Рисунок 4 – Внешний вид установки

6. В открывшемся окне авторизации заполнить требуемые поля следующими данными (см. Рисунок 5):
- поле «Название учреждения» (см. Рисунок 5, позиция 1) — «Наука»;
  - поле «Пароль» (см. Рисунок 5, позиция 2) — «xOFcNwoa»,
- и нажать кнопку «Войти» (см. Рисунок 6).

Аналитическая информационная система 4.7.53.1134

REVI AIS

Авторизация

Название учреждения  × 1

Пароль  × 2

Войти

Рисунок 5 – Окно авторизации

Аналитическая информационная система 4.7.53.1134

REVI AIS

Авторизация

Наука  ×

.....

Войти

Рисунок 6 – Кнопка «Войти»

7. В открывшемся окне авторизации заполнить требуемые поля следующими данными (см. Рисунок 7):

- поле «Логин» (см. Рисунок 7, позиция 1) — «Тестовый аккаунт»;
- поле «Пароль» (см. Рисунок 7, позиция 2) — «xOFcNwoa»,

и нажать кнопку «Войти» (см. Рисунок 8).

Аналитическая информационная система 4.7.53.1134

Наука Выход

РЕVIAIS

Авторизация

Логин

Пароль

Войти

Рисунок 7 – Окно авторизации

Аналитическая информационная система 4.7.53.1134

Наука Выход

РЕVIAIS

Авторизация


Тестовый Аккаунт

.....

Войти

Рисунок 8 – Кнопка «Войти»

8. Установить ПИН-код для последующей быстрой авторизации в «Ревимоушен» (см. Рисунок 9).

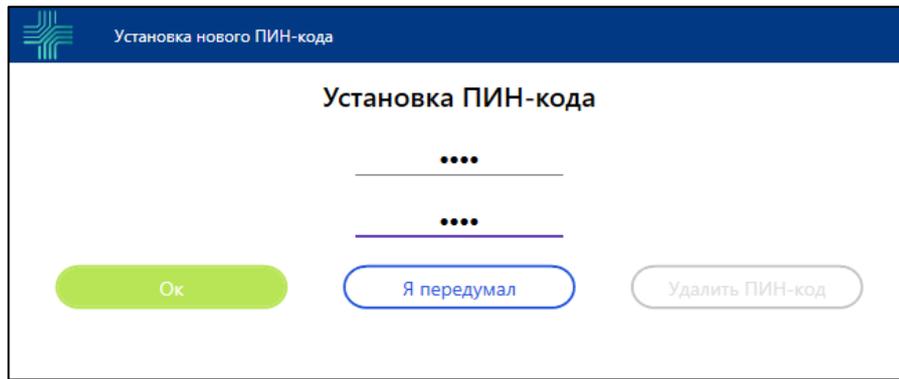

Установка нового ПИН-кода

### Установка ПИН-кода


••••

••••

Ок Я передумал Удалить ПИН-код

Рисунок 9 – Установка ПИН-кода для быстрой авторизации

В результате отобразится стартовая страница «Аналитическая информационная система «ReviAIS» (далее — АИС), представленная на рисунке ниже (см. Рисунок 10).

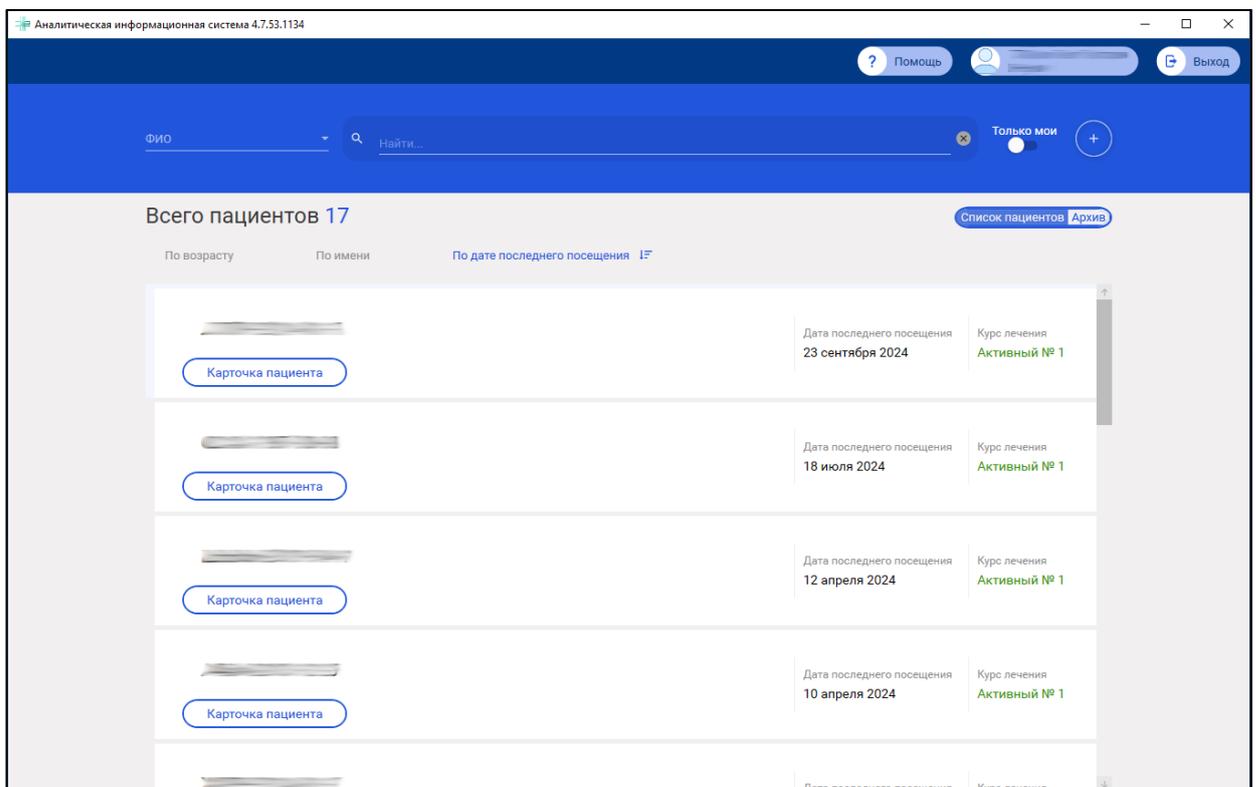

Аналитическая информационная система 4.7.53.1134

Помощь Выход

ФИО Найти...

Только мои

Всего пациентов 17

Список пациентов Архив

По возрасту По имени По дате последнего посещения

Карточка пациента	Дата последнего посещения	Курс лечения
Карточка пациента	23 сентября 2024	Активный № 1
Карточка пациента	18 июля 2024	Активный № 1
Карточка пациента	12 апреля 2024	Активный № 1
Карточка пациента	10 апреля 2024	Активный № 1

Рисунок 10 – Стартовая страница АИС